



Scriba – 1000x600mm

- Tilt: -
- Streepje: Links Recht
- Lade: Links Recht
- Materiaal: Standaard Magnetische

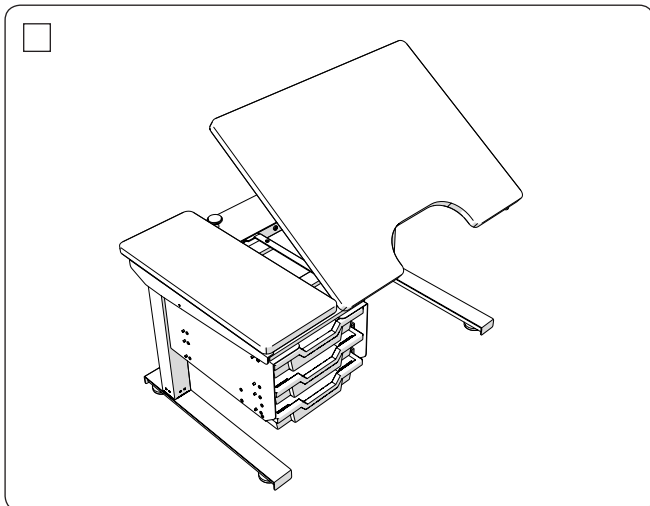

Scriba – 1000x600mm

- Tilt:
- Streepje: Links Recht
- Lade: Links Recht
- Materiaal: - Standaard Magnetische

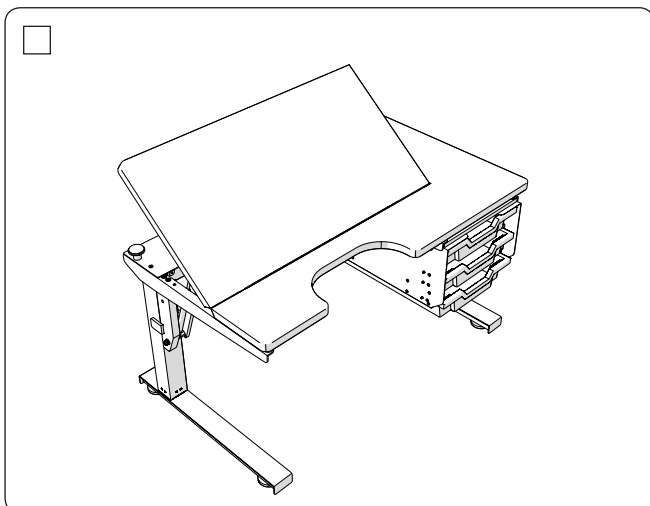


Scriba – 1000x600mm

- Tilt:
- Streepje: Links Recht
- Lade: Links Recht
- Materiaal: - Standaard Magnetische

4. Voor gebruik

4.1. De tabel nivelleren



Level de tafel en zorg voor een gelijkmatige gewichtsverdeling door de vier ondersteunende voeten aan te passen.

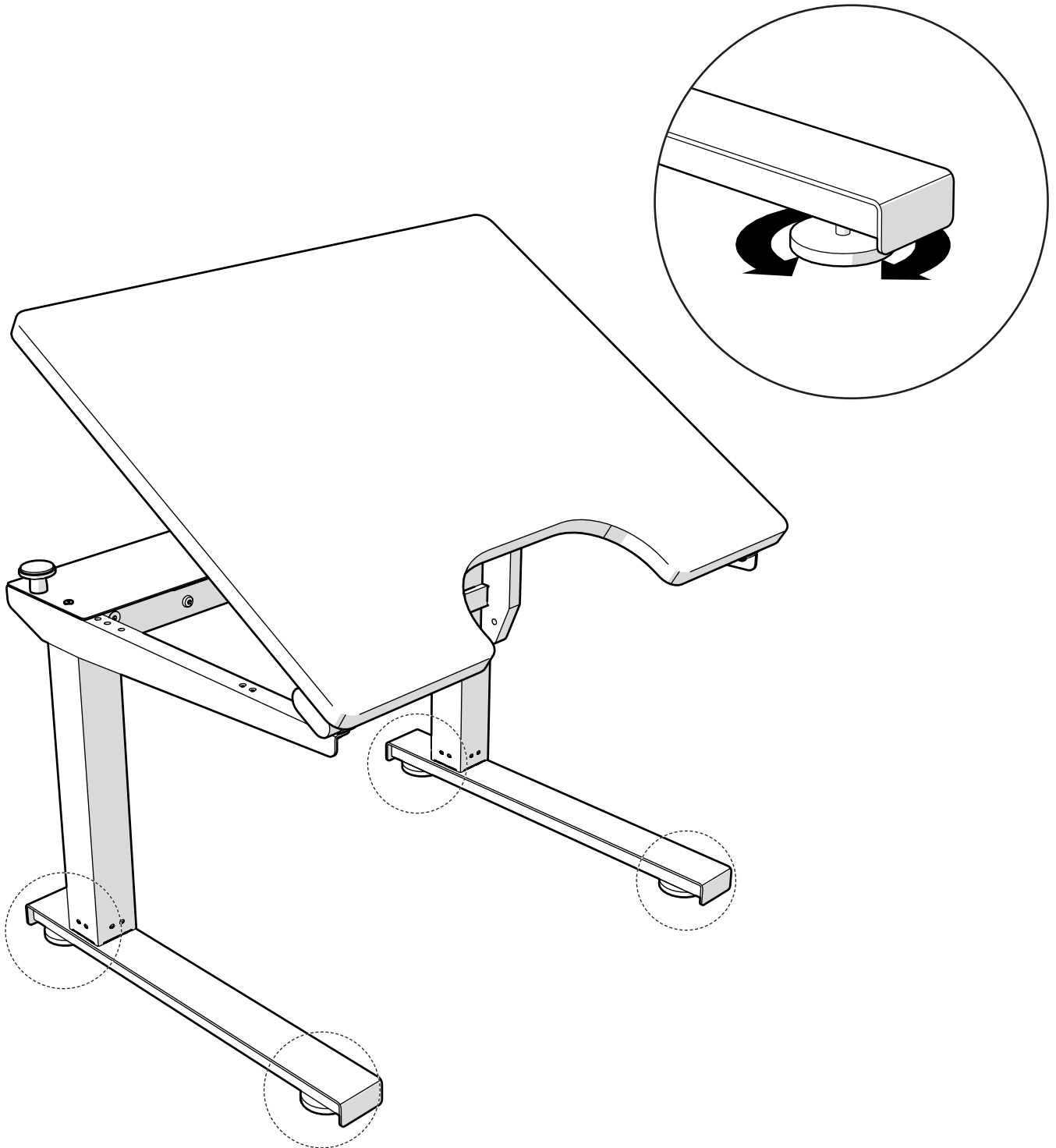

5. Tafelblad kantelen


Het kantelen van het tafelblad is in stappen verstelbaar. Om het te verhogen, trek je het tafelblad gewoon naar de gewenste hoek en laat het gaan.

Om het tafelblad te verlagen, trek het naar de maximale kanteling en laat los. Het vergrendelingsmechanisme wordt uitgeschakeld en het tafelblad moet langzaam dalen.

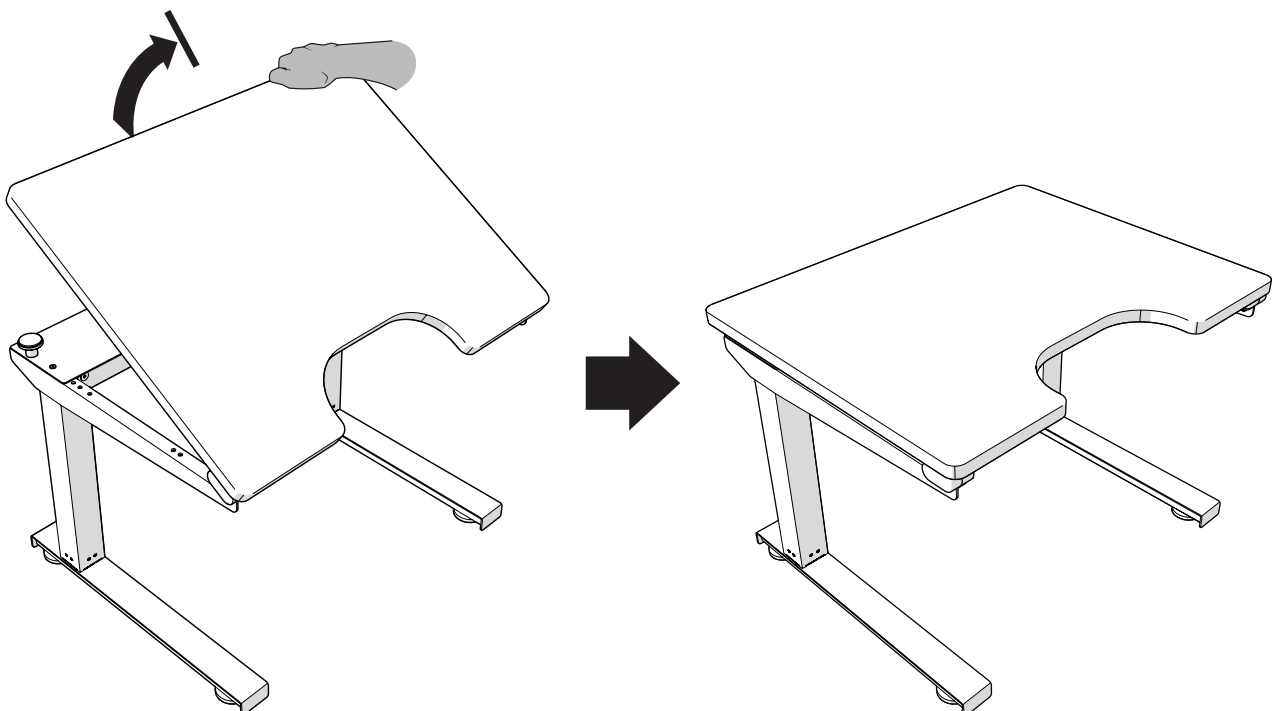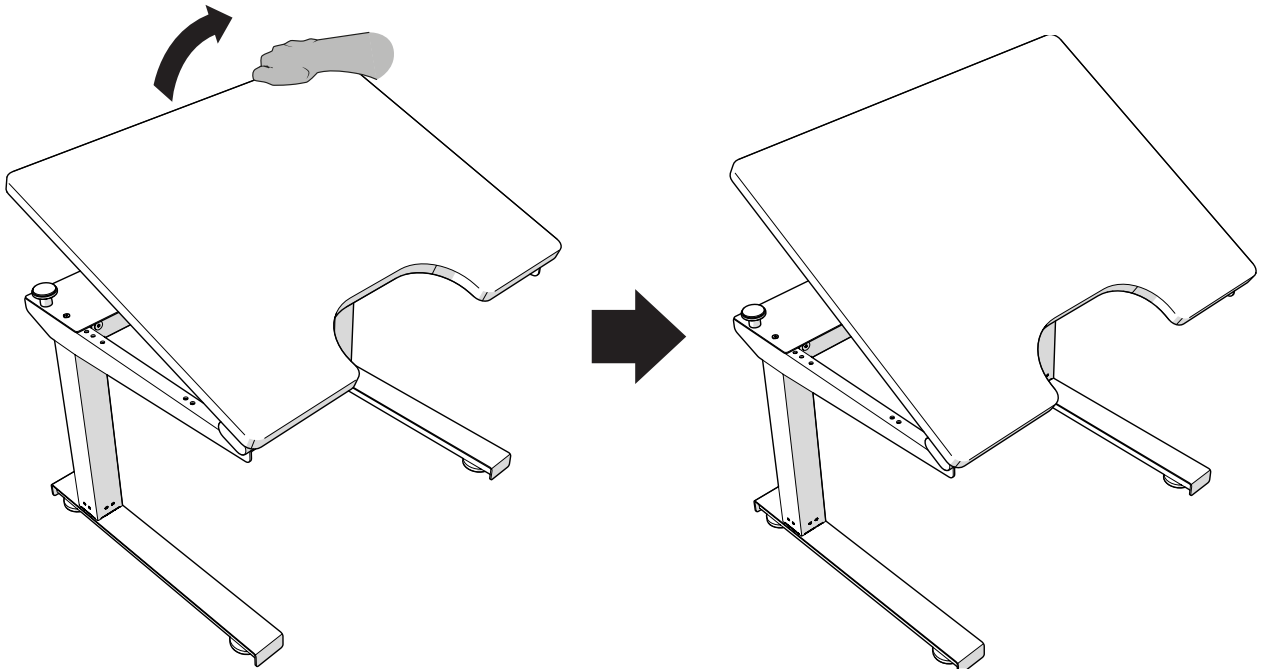

6. Hoogteverstelling

De tafel is uitgerust met een krukas. Het draaien van de krukas met de klok mee verhoogt de tafel. Het draaien van de krukas tegen de klok in verlaagt de tafel.

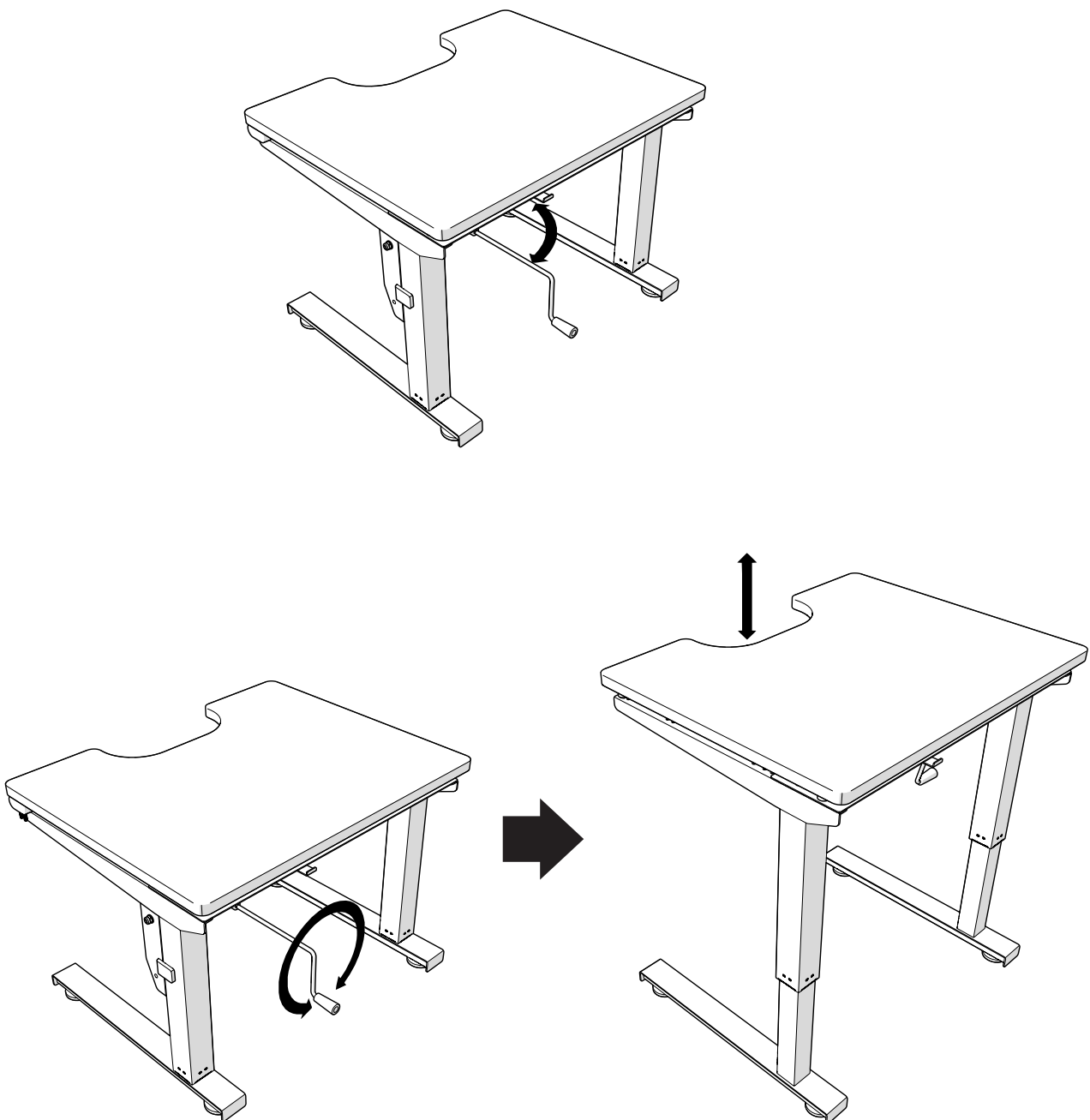

7. Reiniging en onderhoud

- De tafel moet worden afgeveegd en schoon gehouden van stof en vuil.
- De tafel moet worden gewassen met behulp van een ontsmettingsmiddel met PH 7–12 (geconcentreerd).



8. Vernietiging en recycling

8.1. Brandbaar

- Tafelblad
- Laden

8.2. Metalen

- Frame
- Gasveren
- Andere metalen onderdelen in producten verkocht door Mercado Medic

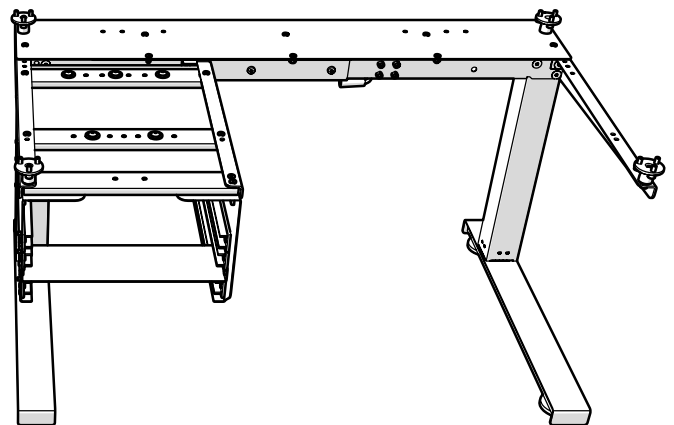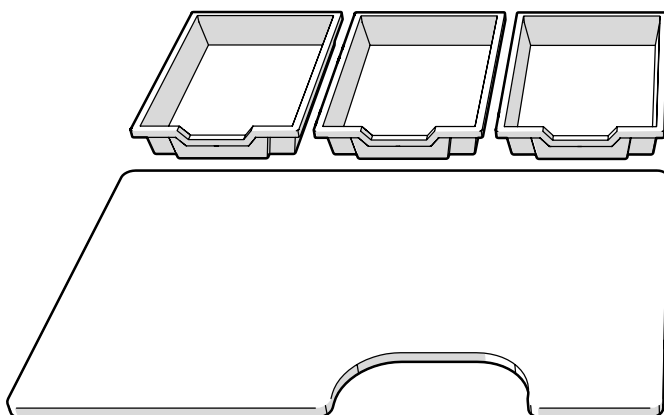

Contactgegevens

Mercado Medic Nederland BV



Mercado Medic Nederland BV

Nobelweg 22

3899 BN Zeewolde



Telefoon: + 31 36 521 99 95

Fax: +31 36 521 99 90



www.mercado-medic.nl

admin@mercado-medic.nl

Ruimte voor productlabel
met serienummer.